

Notice simplifiée : Incubateur Isolette 8000


Mise en marche :

Appuyer sur l'**interrupteur On/Off (2)**.


L'**interrupteur général (1)** sur le socle peut être laissé en permanence sur ON.

Au cours de l'autotest tous les voyants lumineux s'illuminent et l'alarme sonore retentit.

Après les tests de démarrage, l'incubateur se réinitialise en **mode Air**.

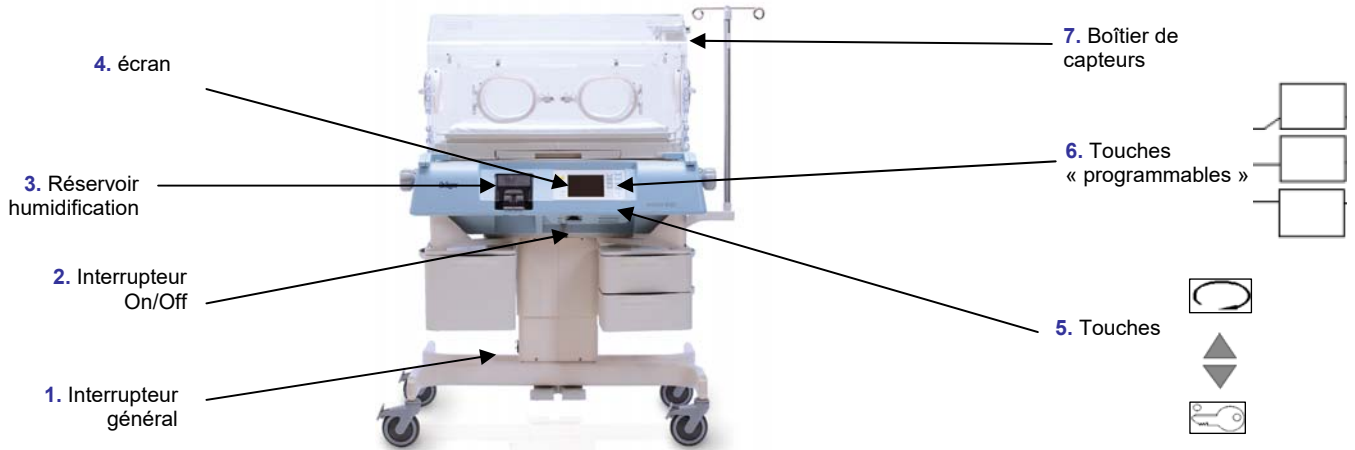

Mise en place d'une ou deux sondes cutanées

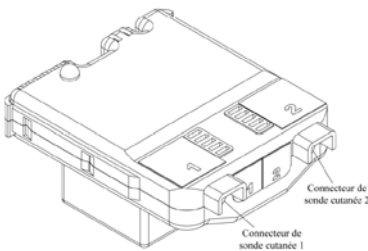

Pour suivre la **température centrale** ou pour utiliser le **Mode Cutané**, brancher la sonde cutanée dans le **connecteur 1**.

Pour utiliser la fonction **thermomonitoring**, et suivre parallèlement à la température centrale (1), la **température périphérique** ou la **température centrale d'un deuxième enfant** :

Brancher la seconde sonde dans le connecteur 2.

Gestion des Alarmes

Une **alarme** retentit chaque fois qu'une **condition potentiellement dangereuse** est détectée.


Inhibition de l'alarme sonore possible dans certains cas, en appuyant sur la touche 

La **durée d'inhibition** d'alarme dépend de la **condition de déclenchement**.

La liste des alarmes est disponible dans la notice d'utilisation à partir de la page 102.


Remarque : Il y a blocage de l'alarme pendant **1 heure** après démarrage de l'appareil.

Tendances :

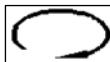L'accès aux tendances se fait en appuyant sur la touche écran 

Sélectionnez la touche **Tendances** puis **Courbes** pour faire défiler les différents paramètres monitorés (T°air, T°cutanées 1 et 2, % humidité, puissance de chauffe et la pesée).

Vous pouvez aussi régler la durée des tendances de 2 heures à 24 heures en appuyant sur la touche **Heures**.

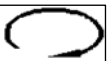
Le retour à l'écran de réglages est temporisé, ou peut se faire en appuyant sur la touche **Retour** puis 

Notice simplifiée : Incubateur Isolette 8000




Sélection et réglage du mode Air ou Cutané :

1) A droite de l'écran (2), déverrouiller le clavier en appuyant sur la touche

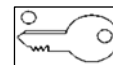

2) Appuyer sur la touche à droite du nom du **mode choisi (A ou B)**.

Le signe  indique que le **mode est en fonctionnement**.

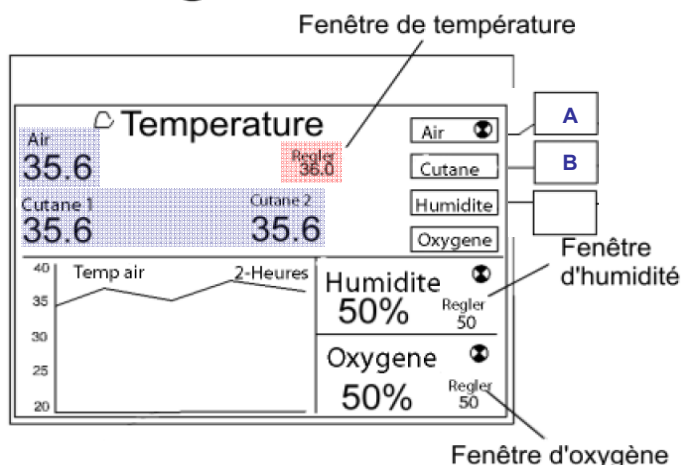

3) Régler la température choisie pour le mode actif à l'aide des touches



Dans la fenêtre de température :


- le **réglage** (valeur consigne) s'affiche sous **Régler** ;

- les **valeurs mesurées** sous **Air, Cutané 1 et Cutané 2**.

Remarque : les réglages de températures se font par **incrément de 0,1°C** dans les pages suivantes :

Mode Air : 20°C-39°C

Mode Cutané : 34°C-38°C

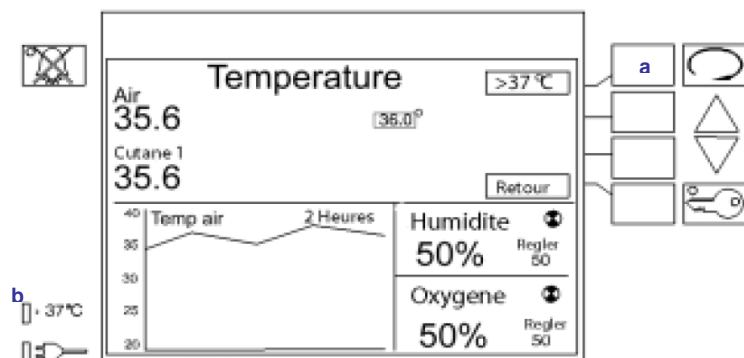


4) Pour **dépasser 37°C** en Mode Air ou Cutané, appuyer sur la touche **>37°C (a)**
Le voyant **(b)** s'allume.

5) Pour **revenir à l'écran principal**, appuyer sur la touche **Retour (R)**.

Sélection/Arrêt et réglages du mode Humidité:

1) A droite de l'écran (2), déverrouiller le clavier en appuyant sur la touche

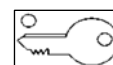

2) Appuyer sur la touche **Humidité (C)**.

3) Appuyer sur **Marche / Arrêt** pour activer / désactiver le mode.


 Indique que le **mode est en fonctionnement**.

4) Régler le pourcentage désiré pour le mode actif à l'aide des touches



Le **réglage** (valeur consigne) s'affiche sous **Régler**

La valeur mesurée sous **Humidité**

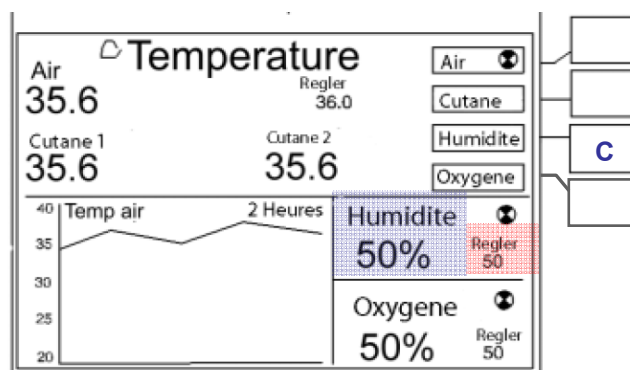

5) Pour **revenir à l'écran principal**, appuyer sur la touche **Retour (R)**.

Notice simplifiée : Incubateur Isolette 8000




Utilisation de la balance intégrée :

1) Préparer l'incubateur à la pesée :



- placer l'incubateur en position à plat pour supprimer toute proclive ou déclive en faisant tourner la manette de droite et celle de gauche si besoin
- placer le nouveau-né au centre du matelas
- ne pas laisser un jouet ou une peluche présent sur le matelas reposer également contre les parois ou les panneaux d'accès
- ne pas laisser le couvre-matelas dépasser du matelas et reposer sur d'autres parties de l'incubateur
- fixer le tuyau du ventilateur et les tubulures IV aux parois de l'incubateur pour qu'ils ne reposent pas sur le matelas et qu'ils ne changent pas de position relative entre la position du nouveau-né sur le matelas ou soulevé pour la pesée

2) A droite de l'écran (2), déverrouiller le clavier en appuyant sur la touche

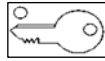

3) Appuyer ensuite sur la touche c pour obtenir le menu comportant le mode Poids.

4) Appuyer sur la touche à droite de Poids (c).

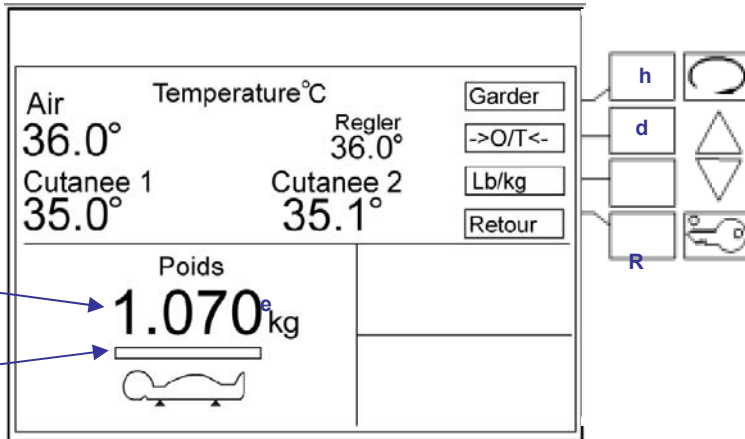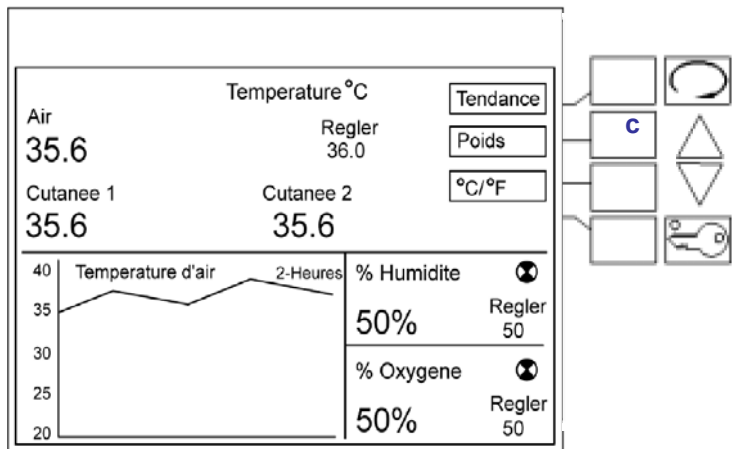

dans les **tendances**, appuyer sur la touche (h).

5) Pour faire le Zéro :

- Appuyer 2 fois sur la touche (d). L'indication « soulever le bébé » apparaît (e).
- Soulever le nouveau-né du matelas
- La barre échantillon de poids (f) se remplit en blanc puis l'indication (e) disparaît et le **0,000** apparaît surligné en blanc (g).

6) Placer le bébé sur le matelas. Le poids du bébé apparaît à l'écran (g).

7) Pour conserver le poids du bébé

8) Pour confirmer les réglages et revenir à l'écran principal, appuyer sur la touche Retour (R).

Notice simplifiée : Incubateur Isolette 8000



Accès et remplissage du réservoir d'humidification :

- 1) Tirer le loquet vers l'avant pour extraire l'ensemble du réservoir par l'avant de la coque de l'incubateur.
- 2) Tourner $\frac{1}{2}$ tour le capuchon du couvercle puis remplir (A).



Nettoyage du réservoir d'humidification :

- 1) Retirer le couvercle de l'ensemble du réservoir à l'aide de la languette sur le couvercle. L'ensemble couvercle et réservoir est autoclavable à 134°.
- 2) Retirer l'évaporateur de son logement en tirant les languettes latérales (C). L'évaporateur requiert une décontamination de surface par un nettoyant/désinfectant tuberculocide de niveau intermédiaire (**L'évaporateur n'est pas autoclavable !!!**).

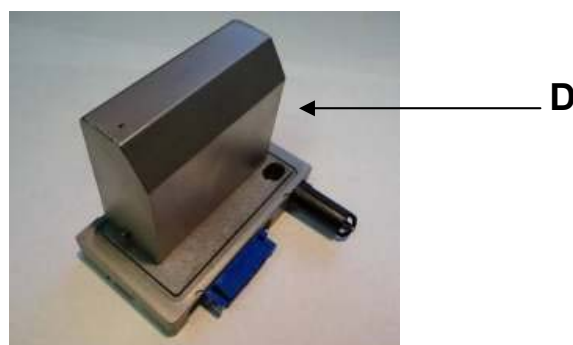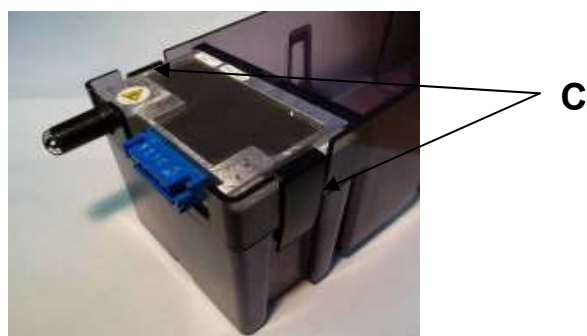

Avertissement : L'évaporateur (D) peut être suffisamment chaud pour causer des brûlures. Attendre au moins 45 min après l'extinction de l'appareil pour l'extraire ou le toucher.

L'évaporateur élève la température de l'eau jusqu'au point d'ébullition, garantissant une fonction germicide lors de l'humidification.